


## KULLANIM KILAVUZU GBL®ASSISTAIN-ASİTLİ ALKOL

	<b>ÜRÜN ADI</b>	: Asitli Alkol	
	<b>MARKASI</b>	: GBL® ASSISTAIN	
	<b>ÜRÜN REF NO</b>	: 2426	
	<b>Stok Kodu</b>	<b>Ambalaj Şekli</b>	<b>Birim Ambalaj Hacmi</b>
442426020500	500 ml, HDPE Beyaz Şişe 28 mm	500 ml	

### **KULLANIM AMACI**

Genellikle regresif boyama sırasında farklılaştırma (dekolorizasyon) için kullanılır.

### **FONKSİYONU**

Ürün, tanı veya tanıya yardımcı olma amacıyla manuel kullanım için tasarlanmıştır.

### **GEREKEN NUMUNE TÜRÜ**

Tüm vücut sıvıları.

### **CALIŞMA PRENSİBİ**

Gram Asitli alkol bir farklılaştırma reaktifidir. Genellikle regresif boyama yöntemlerinde kullanılır. Nükleer ve nükleer olmayan yapılar arasında mükemmel bir ayırım sağlar. Farklılaşma; çekirdek boyalı kalırken, asitli alkolün boyaları sitoplazmadan uzaklaştırmasıyla gerçekleşir. Bunun nedeni, nükleer boyanın çekirdeğe sitoplazmadan daha güçlü bağlanmasıdır.

### **İÇERİK BİLGİSİ**

%96 Etil alkol, metanol ve %37 hidroklorik asit.

### **UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER**

Ürünler yalnızca profesyonel kullanım içindir. Çok alevlenir sıvı ve buhar. Yutulması halinde zararlıdır.

Cilt tahrişine yol açar.

Göz tahrişine yol açar.

Organlarda hasara yol açar. : Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirli tüm giysilerini hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

Maruz kalınma halinde: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.

## DEPOLAMA KOŞULLARI

Saklama sıcaklığı	Raf Ömrü
15/25 °C	2 yıl

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, gölge bir ortamda saklayınız. Ağız sıkıca kapalı ve iyi havalandırılmış bir ortamda muhafaza edilmelidir.

## SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
Asitli Alkol	2426	442426020500	500 ml, HDPE Beyaz Şişe 28 mm	500 ml

## SEMBOL ANAHTARI

 REF Numarası	 Ürün Üretim Tarihi	 Ürün Depolama Sıcaklığı	 Üretici Bilgisi
 LOT Numarası	 Ürün Son Kullanma Tarihi	 Ürün Kullanım Kılavuzuna Bakın	 Ambalaj Geri dönüşüm bilgisi
 In Vitro Diagnostik			



### GBLGül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / Türkiye  
Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / Türkiye  
Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • [www.gbl.com.tr](http://www.gbl.com.tr) • [info@gbl.com.tr](mailto:info@gbl.com.tr)

Ürünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları [kalite@gbl.com.tr](mailto:kalite@gbl.com.tr) adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.