


KULLANIM KILAVUZU

GBL® ROSA-STAIN – PAMUK MAVİSİ LAKTOFENOL BOYASI

	ÜRÜN ADI	: Pamuk Mavisi Laktofenol Boyası	
	MARKASI	: GBL® Rosa-Stain	
	ÜRÜN REF NO	: 2480	
	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
	442480050050	50 ml, HDPE Damlalıklı Beyaz Şişe	50 ml
442480050250	250 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe	250 ml	

KULLANIM AMACI

Mantarların boyanarak mikroskop altında incelenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

FONKSİYONU

Ürün, tanı veya tanıya yardımcı olma amacıyla manuel kullanım için tasarlanmıştır

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Laktofenol pamuk mavisi, klinik örneklerin fungal elementler açısından doğrudan incelenmesinde kullanılan mavi bir boyadır. Solüsyonun içindeki laktik asit özellikle mantar elementlerinin muhafazasında, fenol mantarların öldürülmesinde ve pamuk mavisi (anilin mavisi) de boyamada görev olarak iyi bir görünüm sağlar.

İÇERİK BİLGİSİ

Pamuk mavisi 0,5 g/l, fenol 200 g/l, laktik asit 200 ml/l, gliserin 400 ml/l.

BOYAMA METODUNUN UYGULANMASI

Etap sayısı: Yıkamalar ve kurutmalar dahil 6 etap.

Boyama süresi: Yıkama ve kurutmalar dahil 10 dakika.

- 1- Lam üzerine bir damla 95'lik etil alkol damlatın.
- 2- Öze ile bir miktar kültür alın, bu damla içinde öze yardımıyla ezerek dağıtın.
- 3- Alkolün uçmasını bekleyin.
- 4- Bir damla pamuk mavisi laktofenol boyası (GBL-2480) koyun ve öze ile hafifçe yayın.
- 5- Üzerine lamel kapatın, hafifçe bastırın ve yayılmasını sağlayın.
- 6- Boyanın etkileşmesi için 10 dk kadar bekleyin ve mikroskopta inceleyin.

Kalite Kontrol sonuçları:

Mantar elemanları Açık mavi

UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER

Tehlike. Yutulması halinde zararlıdır. Cilt ile teması halinde toksiktir. Solunması halinde toksiktir. Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. Genetik hasara yol açma şüphesi var. Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. Koruyucu eldiven/koruyucu

kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. Maruz kalınma veya etkileşim halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Saklama sıcaklığı	Raf Ömrü
15/25 °C	2 yıl

SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
Pamuk Mavisi Laktofenol Boyası	2480	442480050050	50 ml, HDPE Damlalıklı Beyaz Şişe	50 ml
		442480050250	250 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe	250 ml

SEMBOL ANAHTARI

 REF Numarası	 Ürün Üretim Tarihi	 Ürün Depolama Sıcaklığı	 Üretici Bilgisi
 LOT Numarası	 Ürün Son Kullanma Tarihi	 Ürün Kullanım Kılavuzuna Bakın	 Ambalaj Geri dönüşüm bilgisi
 In Vitro Diagnostik			



GBLGül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • www.gbl.com.tr • info@gbl.com.tr

Ürünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları kalite@gbl.com.tr adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.