

KULLANIM KILAVUZU

ERİTROSİT SAYIM ÇÖZELTİSİ (HAYEM ÇÖZELTİSİ)



ÜRÜN ADI	: Eritrosit Sayım Çözeltisi (Hayem Çözeltisi)								
MARKASI	: GBL® Rosa-Stain								
ÜRÜN REF NO	: 2085								
<table><tr><th>Stok Kodu</th><th>Ambalaj Şekli</th><th>Birim Ambalaj Hacmi</th></tr><tr><td>442085050500</td><td>500 ml, HDPE Beyaz Şişe</td><td>500 ml</td></tr></table>				Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi	442085050500	500 ml, HDPE Beyaz Şişe	500 ml
Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi							
442085050500	500 ml, HDPE Beyaz Şişe	500 ml							

KULLANIM AMACI

Işık mikroskopisi, kan örneklerinde eritrosit (alyuvar) sayımı yapmak için kullanılan bir seyreltme çözeltisidir. Hemositometre (sayım lamı) ile manuel eritrosit sayımı için kullanılır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Eritrosit Sayım Çözeltisi (Hayem Çözeltisi), eritrositlerin seyreltildiği ve korunduğu bir ortam sağlayarak, mikroskop altında daha net bir sayım yapılmasına olanak tanır. Kan örneklerinin mikroskop altında incelenmesi sırasında, eritrositlerin yapısal bütünlüğünü koruyarak doğru sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.

İÇERİK BİLGİSİ

Sodyum Klorür, Sodyum sülfat, Cıva II klorür.

BOYAMA METODUNUN UYGULANMASI

Kan Örneği Alımı:

Antikoagülan içeren bir kaptan alınan kan kullanılır.

Seyreltme:

20 µL kan, 4 mL Eritrosit Sayım Çözeltisi (Hayem Çözeltisi) ile karıştırılır (1:200 seyreltme).

Sayım:

Hemositometreye yüklenir ve ışık mikroskopunda eritrositler sayılır.

UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER

Maddelerin veya Karışımların SEA Hakkında Yönetmeliği (RG 11.12.2013 Sayısı: 28848 mükerrer) ve 1272&2008 [CLP/GHS](EC) No'lu direktife göre sınıflandırma

Maddelerin veya Karışımların SEA Hakkında Yönetmeliği (RG 11.12.2013 Sayısı: 28848 mükerrer) ve 1272&2008 [CLP/GHS](EC) No'lu direktife göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Saklama sıcaklığı	Raf Ömrü
15/25 °C	2 yıl

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, gölge bir ortamda saklayınız. Ağzı sıkıca kapalı ve iyi havalandırılmış bir ortamda muhafaza edilmelidir.

SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
Eritrosit Sayım Çözeltisi (Hayem Çözeltisi)	2085	442085050500	500 ml, HDPE Beyaz Şişe	500 ml

SEMBOL ANAHTARIREF
NumarasıÜrün Üretim
TarihiÜrün
Depolama
SıcaklığıÜretici
BilgisiLOT
NumarasıÜrün Son
Kullanma
TarihiÜrün
Kullanım
Kılavuzuna
BakınAmbalaj
Geri
Dönüşüm
BilgisiIn Vitro
Diagnostik**GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • www.gbl.com.tr • info@gbl.com.trÜrünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları kalite@gbl.com.tr adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.