

KULLANIM KILAVUZU

FORMALİN TAMPONLU NÖTRAL FİKSATİFİ %10

	ÜRÜN ADI	: Formalin Tamponlu Nötral Fiksatif %10	
	MARKASI	: GBL® Rosa-Fix	
	ÜRÜN REF NO	: 2125	
	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
	442125000050	50 ml, HDPE Damlalıklı Beyaz Şişe	50 ml

KULLANIM AMACI

%10 Formalin Tamponlu Nötral Fiksatif, histoloji ve patoloji laboratuvarlarında doku örneklerini uzun süre korumak ve mikroskopik inceleme için sabitlemek amacıyla kullanılır. Özellikle: Biyopsi ve cerrahi doku örneklerinin korunması, morfolojinin bozulmasını önleme, boyamaya uygun fiksasyon sağlama (H&E, İmmünohistokimya vb.), proteinleri ve hücresel bileşenleri çapraz bağlayarak stabilizasyon sağlama için idealdir.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Formaldehit, doku içindeki proteinleri birbirine bağlayarak dokunun sertleşmesini ve korunmasını sağlar. Tampon sistemi, asit oluşumunu engeller, böylece asit fiksatiflere kıyasla doku büzülmesini azaltır. Hücre zarlarının korunmasını destekler ve dokuların doğal yapısına en yakın şekilde sabitlenmesini sağlar.

İÇERİK BİLGİSİ

Formalin, Fosfat tamponları

UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER

Tehlike. Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. Solunum yolu tahrişine yol açabilir. Kansere yol açma şüphesi var. Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerini hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın. Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi tavsiye/yardım alın.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Saklama sıcaklığı	Raf Ömrü
15/25 °C	2 yıl

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, gölge bir ortamda saklayınız. Ağız sıkıca kapalı ve iyi havalandırılmış bir ortamda muhafaza edilmelidir.

SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
Formalin Tamponlu Nötral Fiksatif %10	2125	442125000050	50 ml, HDPE Damlalıklı Beyaz Şişe	500 ml

SEMBOL ANAHTARI

 REF Numarası	 Ürün Üretim Tarihi	 Ürün Depolama Sıcaklığı	 Üretici Bilgisi
 LOT Numarası	 Ürün Son Kullanma Tarihi	 Ürün Kullanım Kılavuzuna Bakın	 Ambalaj Geri Dönüşüm Bilgisi
 In Vitro Diagnostik	 GHS07: TEHLİKE	 GHS05: AŞINDIRICI	 GHS08: ZARARLI



GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE
Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • www.gbl.com.tr • info@gbl.com.tr

Ürünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları kalite@gbl.com.tr adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.