


KULLANIM KILAVUZU EOSİN NİGROSİN SPERM BOYASI

	ÜRÜN ADI	: Eosin Nigrosin Sperm Boyası	
	MARKASI	: GBL® Ferti-Rose	
	REF No	: 2217	
	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
442217050050	50 ml, HDPE Damlalıklı Beyaz Şişe	50 ml	

KULLANIM AMACI

Sperm motilitesinin düşük olduğu durumlarda canlı sperm sayısını saptamak amacıyla kullanılır.

GEREKEN NUMUNE TÜRÜ

Semen örneği.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Eosin nigrosin sperm boyamasının temeli; ölü spermlerin zar yapısı bozulduğundan dolayı boyayı içeri alması ve boyanmış olarak görünmesi esasına dayanır.

İÇERİK BİLGİSİ

Sodyum Klorür, Eosin Y, Nigrosin, Stabilizatörler.

BOYAMA METODUNUN UYGULANMASI

- Semen numunesini iyice karıştırın.
- 0,05 ml semen numunesi ve 0,05 ml Eosin-Nigrosin boyasını test tüpü içinde karıştırın ve 30 saniye bekleyin. (1 damla = 0,05 ml)
- 30 saniye sonra süspansiyondan 1 damla alarak lam üzerine yayma preparatı hazırlayın ve havada kurumaya bırakın.
- Su içermeyen tespit ortamında fikse edin.
- Aydınlık alanlı mikroskop altında x1000 büyütmede ve immersiyon yağında inceleyin.
- Bir laboratuvar hücre sayıcısıyla, boyalı (ölü) veya boya tutmamış (canlı) hücreleri sayın.

Kalite Kontrol Mikroorganizmaları	Sonuç
Canlı spermatozoalar	Renksiz
Ölü spermatozoalar	Pembe-Kırmızı

UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER

Ürünler yalnızca profesyonel kullanım içindir. Dikkat. Ciddi göz tahrişine yol açar. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi tavsiye/yardım alınız. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

DEPOLAMA KOŞULLARI









Saklama Sıcaklığı	Raf Ömrü
2/25 °C	1 yıl

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan ve iyi havalandırılmış gölge bir ortamda ağzı iyice kapalı muhafaza edilmelidir.

SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
Eosin Nigrosin Sperm Boyası	2217	442217050050	50 ml, HDPE Damlalıklı Beyaz Şişe	50 ml

SEMBOL ANAHTARI

 Ref Numarası	 Ürün Üretim Tarihi	 Ürün Depolama Sıcaklığı	 Üretici Bilgisi
 Lot Numarası	 Ürün Son Kullanma Tarihi	 Ürün Kullanım Kılavuzuna Bakın	 Ambalaj Geri Dönüşüm Bilgisi
 In Vitro Diagnostik			



GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • www.gbl.com.tr • info@gbl.com.tr

Ürünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları kalite@gbl.com.tr adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.