

KULLANIM KILAVUZU

Retikülosit Boyası; Parlak Krezil Mavili

	ÜRÜN ADI		: Retikülosit Boyası; Parlak Krezil Mavili
	MARKASI		: GBL® Rosa-Stain
	ÜRÜN REF NO		: 2405
	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
	442405050050	50 ml, HDPE Damlalıklı Beyaz Şişe	50 ml
	442405020500	500 ml, HDPE Beyaz Şişe 28 mm	500 ml

KULLANIM AMACI

Retikülositlerin ışık mikroskopisi ile incelenmesinde ve sayımlarında kullanılır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Retikülositler, kemik iliğinde olgunlaşmaya devam ederken, hala hücre içindeki RNA'yı korurlar. Bu nedenle, retikülosit boyası genellikle RNA'yı boyayan bir boya içerir.

Parlak Krezil Mavili, genellikle retikülosit boyama işlemi için kullanılan bir boya türüdür. Bu boya, hücre içinde bulunan RNA'yı boyamak için özel olarak formüle edilmiştir. Retikülositler, Parlak Krezil Mavili ile boyandığında, hücre içindeki RNA belirgin bir şekilde renklendirilir ve retikülositler kolayca tanınabilir hale gelir. Bu şekilde, retikülosit boyası, genç kırmızı kan hücrelerinin mikroskop altında görüntülenmesini ve sayılmasını kolaylaştırır.

İÇERİK BİLGİSİ

Brilliant krezil mavisi, Sodyum oksalat, Sodyum klorür, sodyum azid.

BOYAMA METODUNUN UYGULANMASI

1. Küçük bir deney tüpüne 10 damla (0,5 ml) "Retikülosit Boyası; Parlak Krezil Mavili" (GBL-2405) ürünü koyun.
2. Üzerine 3 damla kan ekleyin. Karıştırın. 15 dakika oda sıcaklığında bekletin.
3. Lama yayın.
4. Havada kurutun.
5. Mikroskopta inceleyin.

UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER

Ürünler yalnızca profesyonel kullanım içindir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Saklama sıcaklığı	Raf Ömrü
15/25 °C	2 yıl

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, gölge bir ortamda saklayınız. Ağız sıkıca kapalı ve iyi havalandırılmış bir ortamda muhafaza edilmelidir.

SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
Retikülosit Boyası; Parlak Krezil Mavili	2405	442405050050 442405050500	50 ml, HDPE Damlalıklı Beyaz Şişe 500 ml, HDPE Beyaz Şişe 28 mm	50 ml 500 ml

SEMBOL ANAHTARI



REF Numarası



Ürün Üretim Tarihi



Ürün Depolama Sıcaklığı



Üretici Bilgisi



LOT Numarası



Ürün Son Kullanma Tarihi



Ürün Kullanım Kılavuzuna Bakın



Ambalaj Geri Dönüşüm Bilgisi



In Vitro Diagnostik



GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • www.gbl.com.tr • info@gbl.com.tr

Ürünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları kalite@gbl.com.tr adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.