

KULLANIM KILAVUZU METİLEN MAVİSİ ÇÖZELTİSİ

	ÜRÜN ADI	: Metilen Mavis Çözeltisi	
	MARKASI	: GBL® Rosa-Stain	
	ÜRÜN REF NO	: 2420	
	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
	442420050100	100 ml, HDPE Damlalıklı Beyaz Şişe	100 ml
	442420050250	250 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe	250 ml
	442420020500	500 ml, HDPE Beyaz Şişe 28 mm	500 ml
	442420011000	1000 ml, HDPE Beyaz Şişe 28 mm	1000 ml

KULLANIM AMACI

Ziehl-Neelsen asit-fast boyama metodu için tasarlanmıştır. Bakteri metakromatik materyaller boyama metodu.

İÇERİK BİLGİSİ

Metilen mavis, %96 Etanol, Surfaktan, stabilizatörler ve koruyucular.

BOYAMA METODUNUN UYGULANMASI

1. Yayma, Karbol Fuksin Boyası (GBL-2423) ile 5 dakika kadar alttan ısıtılarak boyanır.
2. Soğutulur. Distile suyla 5-10 saniye kadar yıkanır.
3. Yayma, Asitli Alkol (GBL-2426) ile 5-30 saniye kadar örtülür.
4. Hassas bir şekilde distile suyla çok kısa yıkanır.
5. Yayma, Metilen Mavis Alkali Boyası, Löffler (GBL-2420) ile 1-2 dakika kadar boyanır.
6. Hassas bir şekilde distile suyla yıkanır. Havada kurutulur. İncelenir.

Kalite Kontrol	Sonuç
Aside direçli mikroorganizmalar	Parlak Kırmızı
Diğer mikroorganizmalar ve arka elemanlar	Mavi

UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER

Tehlike. Çok alevlenir sıvı ve buhar. Ciddi göz tahrişine yol açar Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE : Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE. Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın. İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Saklama sıcaklığı	Raf Ömrü
15/25 °C	2 yıl

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, gölge bir ortamda saklayınız. Ağız sıkıca kapalı ve iyi havalandırılmış bir ortamda muhafaza edilmelidir.

SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
Metilen Mavis Çözeltilisi	2420	442420050100	100 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe	100 ml
		442420050250	250 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe	250 ml
		442420020500	500 ml, HDPE Beyaz Şişe 28 mm	500 ml
		442420011000	1000 ml, HDPE Beyaz Şişe 28 mm	1000 ml

SEMBOL ANAHTARI

 REF Numarası	 Ürün Üretim Tarihi	 Ürün Depolama Sıcaklığı	 Üretici Bilgisi
 LOT Numarası	 Ürün Son Kullanma Tarihi	 Ürün Kullanım Kılavuzuna Bakın	 Ambalaj Geri Dönüşüm Bilgisi
 In Vitro Diagnostik	 GHS02: ALEVLENİR	 GHS07: DİKKAT	



GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE
Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • www.gbl.com.tr • info@gbl.com.tr

Ürünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları kalite@gbl.com.tr adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.