

KULLANIM KILAVUZU

PAMUK MAVİSİ LAKTOFENOL BOYASI

	ÜRÜN ADI	: Pamuk Mavisı Laktofenol Boyası	
	MARKASI	: GBL® Rosa-Stain	
	ÜRÜN REF NO	: 2480	
	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
	442480050050	50 ml, HDPE Damlalıklı Beyaz Şişe	50 ml
	442480050250	250 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe	250 ml

KULLANIM AMACI

Mantarların boyanarak mikroskop altında incelenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Laktofenol pamuk mavisı, klinik örneklerin fungal elementler açısından doğrudan incelenmesinde kullanılan mavi bir boyadır. Solüsyonun içindeki laktik asit özellikle mantar elementlerinin muhafazasında, fenol mantarların öldürülmesinde ve pamuk mavisı (anilin mavisı) de boyamada görev alarak iyi bir görünüm sağlar.

İÇERİK BİLGİSİ

Pamuk mavisı, Fenol, Laktik asit, Gliserin.

BOYAMA METODUNUN UYGULANMASI

Etap sayısı : Yıkamalar ve kurutmalar dahil 6 etap.

Boyama süresi : Yıkama ve kurutmalar dahil 10 dakika.

1. Lam üzerine bir damla 95'lik etil alkol damlatın.
2. Öze ile bir miktar kültür alın, bu damla içinde alınan kültürü öze yardımıyla ezerek dağıtın.
3. Alkolün uçmasını bekleyin.
4. Bir damla **Pamuk Mavisı Laktofenol Boyası (GBL® Rosa-Stain Ref No:2480)** koyun ve öze ile hafifçe yayın.
5. Üzerine lamel kapatın, hafifçe bastırın ve yayılmasını sağlayın.
6. Boyanın etkileşmesi için 10 dk kadar bekleyin ve mikroskopta inceleyin.

Kalite Kontrol Sonuçları:

Mantar elemanları	Açık mavi
-------------------	-----------

UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER

Tehlike. Yutulması halinde zararlıdır. Cilt ile teması halinde toksiktir. Solunması halinde toksiktir. Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. Genetik hasara yol açma şüphesi var. Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. Maruz kalınma veya etkileşim halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Saklama sıcaklığı	Raf Ömrü
15/25 °C	2 yıl

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, gölge bir ortamda saklayınız. Ağız sıkıca kapalı ve iyi havalandırılmış bir ortamda muhafaza edilmelidir.

SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
Pamuk Mavisi Laktofenol Boyası	2480	442480050050	50 ml, HDPE Damlalıklı Beyaz Şişe	50 ml
		442480050250	250 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe	250 ml

SEMBOL ANAHTARI

	REF Numarası		Ürün Üretim Tarihi		Ürün Depolama Sıcaklığı		Üretici Bilgisi
	LOT Numarası		Ürün Son Kullanma Tarihi		Ürün Kullanım Kılavuzuna Bakın		Ambalaj Geri Dönüşüm Bilgisi
	In Vitro Diagnostik		GHS06: TOKSİK		GHS08: ZARARLI		GHS05: AŞINDIRICI
	GHS07: TEHLİKE						



GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • www.gbl.com.tr • info@gbl.com.tr

Ürünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları kalite@gbl.com.tr adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.