


KULLANIM KILAVUZU METANOLLÜ FİKSATİF

	ÜRÜN ADI	: Metanollü Fiksatif	
	MARKASI	: GBL® Rosa-Fix	
	REF No	: 2510	
	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
442510020500	500 ml, HDPE Beyaz Şişe 28 mm	500 ml	
442510011000	1000 ml, HDPE Yuvarlak Beyaz Şişe	1000 ml	

KULLANIM AMACI

Doku fiksatif olarak kullanılır.

GEREKEN NUMUNE TÜRÜ

Tüm vücut sıvıları.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Metanol fiksatif, örneklerin içerisindeki proteinleri çapraz bağlar oluşturarak sabitler. Bu çapraz bağlar, proteinlerin doğal konformasyonlarını korur ve hücrelerin morfolojisini ve yapısını muhafaza eder. Bu sayede, örnekler mikroskop altında incelendiğinde, hücrelerin doğal durumlarına yakın bir şekilde görülebilirler. Metanol fiksatif ayrıca hücre membranlarının ve hücre içi bileşenlerin de korunmasına yardımcı olur. Bu, hücrelerin içerisindeki yapıların ve bileşenlerin dağılmasını veya değişmesini engeller, böylece doğru teşhislerin yapılmasına ve doğru sonuçların elde edilmesine yardımcı olur.

İÇERİK BİLGİSİ

Metanol, RO su

UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER

Tehlike. Cilt tahrişine yol açar. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir. Çok alevlenir sıvı ve buhar. Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir. Kanserle yol açma şüphesi var. Organlarda hasara yol açar. Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Saklama Sıcaklığı	Raf Ömrü
15/25 °C	2 yıl

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan ve iyi havalandırılmış gölge bir ortamda ağzı iyice kapalı muhafaza edilmelidir.

SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
Metanollü Fiksatif	2510	442510020500	500 ml, HDPE Beyaz Şişe 28 mm	500 ml
		442510011000	1000 ml, HDPE Yuvarlak Beyaz Şişe	1000 ml

SEMBOL ANAHTARI

	REF Numarası		Ürün Üretim Tarihi		Ürün Depolama Sıcaklığı		Üretici Bilgisi
	LOT Numarası		Ürün Son Kullanma Tarihi		Ürün Kullanım Kılavuzuna Bakın		Ambalaj Geri Dönüşüm Bilgisi
	In Vitro Diagnostik						

**GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • www.gbl.com.tr • info@gbl.com.trÜrünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları kalite@gbl.com.tr adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.