

## KULLANIM KILAVUZU TAMPONLU TIYAZİN ÇÖZELTİSİ

	<b>ÜRÜN ADI</b>	: Tamponlu Tiyazin Çözeltisi		
	<b>MARKASI</b>	: GBL® Rosa-Stain		
	<b>REF No</b>	: 2512		
	<b>Stok Kodu</b>	<b>Ambalaj Şekli</b>	<b>Birim Ambalaj Hacmi</b>	
442512030250	250 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe	250 ml		
442512020500	500 ml, HDPE Beyaz Şişe 28 mm	500 ml		

### **KULLANIM AMACI**

Vücut sıvılarındaki hücrelerin ışık mikroskopisi ile hızlı ve ayırt edici taranmalarında kullanılır.

### **GEREKEN NUMUNE TÜRÜ**

Tüm vücut sıvıları.

### **ÇALIŞMA PRENSİBİ**

Numune, Tamponlu Tiyazin Çözeltisi içine yerleştirilir ve bekletilir.(Genellikle birkaç dakika ile bir saat arasında). Tiyazin, hücrelerin yapısal bileşenlerine bağlanır ve bu bileşenleri boyar. Çözelti içindeki tampon, pH seviyesini sabitler ve hücre yapılarının korunmasını sağlar.

### **İÇERİK BİLGİSİ**

Fosfat tamponları, Tiyazin grubu boyalar, Stabilizatörler, Prezervatifler, Sürfaktan.

### **UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER**

Maddelerin veya karışımların SEA Hakkında Yönetmeliğe (RG 11.12.2013 Sayısı : 28848 mükerrer) göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

### **DEPOLAMA KOŞULLARI**










Saklama Sıcaklığı	Raf Ömrü
15/25 °C	2 yıl

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan ve iyi havalandırılmış gölge bir ortamda ağzı iyice kapalı muhafaza edilmelidir.

### **SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ**

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
Tamponlu Tiyazin Çözeltisi	2512	442512030250	250 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe	250 ml
		442512020500	500 ml, HDPE Beyaz Şişe 28 mm	500 ml

## SEMBOL ANAHTARI

 REF Numarası	 Ürün Üretim Tarihi	 Ürün Depolama Sıcaklığı	 Üretici Bilgisi
 LOT Numarası	 Ürün Son Kullanma Tarihi	 Ürün Kullanım Kılavuzuna Bakın	 Ambalaj Geri Dönüşüm Bilgisi
 In Vitro Diagnostik			



### GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE  
Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE  
Tel: 0216 364 15 00 •Faks: 0216 314 15 69 • [www.gbl.com.tr](http://www.gbl.com.tr) • [info@gbl.com.tr](mailto:info@gbl.com.tr)

Ürünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları [kalite@gbl.com.tr](mailto:kalite@gbl.com.tr) adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.